



EDTA Kabevette (Bild: LUA, Koblenz)

- **Schutzkappe entfernen**
- **Blut bzw. blutige Körperhöhlenflüssigkeit durch Anziehen des Stempels ansaugen**
- **Stempel bis zum Anschlag aufziehen und abbrechen**
- **Schutzkappe wieder aufsetzen**
- **Verunreinigungen der Kabevetten unbedingt vermeiden!**

Bei Verwendung von wiederverwertbaren Hilfsmitteln (z. B. Messer) zur Entnahme von Proben ist deren anschließende Reinigung und Desinfektion zu berücksichtigen, damit eine mögliche Verschleppung des Erregers oder eine Kontamination von weiteren Proben unterbunden wird.